


# GC INITIAL Zr gum shade set

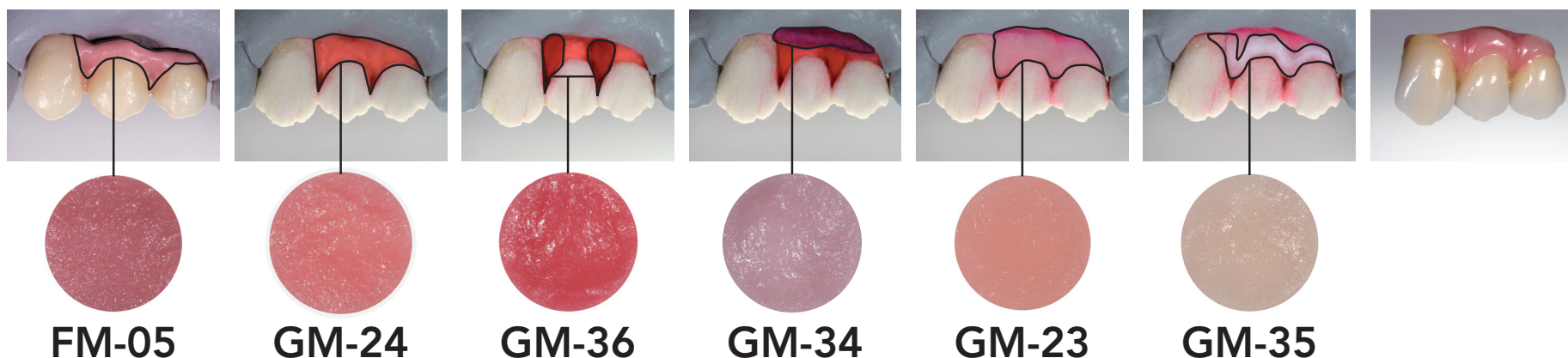

## INSTRUCTIONS TECHNIQUE - Coffret additionnel pour caractérisation individuelle de la gencive

### Frame Mod. Gum

Appliquer et cuire FM-05 en même temps que le Frame Modifier de la teinte.

### Base Dark

Cette masse de base est appliquée en première couche comme support afin de créer un effet de profondeur.

### Intensive Red

Cette masse intensifie les zones situées au niveau radicaire des dents ce qui en fait une zone d'application sélective.

### Intensive Violet

GM-34 peut être utilisée pour les restaurations s'étendant au pli muco-gingival. Il peut être également utilisé avec les types de peau noires.

### Base Light

La gencive est entièrement recouverte de GM-23. C'est une masse basique essentielle pour stabiliser la couleur finale.

### Intensive Cream

Les zones plus lumineuses de la gencive sont reconstituées en surface. GM-35 peut également être appliqué séparément comme masse de retouche.

Les étapes individuelles peuvent être divisées en différentes cuissons. Guide de cuisson identique à la technique de montage par couche (voir Manuel technique de GC Initial Zr).

## ISTRUZIONI TECNICHE - Set aggiuntivo per individualizzare la colorazione gengivale

### Frame Mod. Gum

Si applica e si cuoce con il frame modifier dello stesso colore dei denti.

### Base Dark

Questa massa gengivale di base si applica dopo la massa del colore dei denti. La massa base GM-24 viene applicata come primo strato di fondo.

### Intensive Red

Questa massa intensifica le aree tra le radici dei denti. L'ambito di applicazione è piuttosto ristretto.

### Intensive Violet

GM-34 è adatto ai restauri estesi nella piega mucogengivale. Può anche essere utilizzato con tipi di pelle scura.

### Base Light

Tutto lo strato gengivale viene coperto con GM-23. Si tratta di una massa di base che sostanzialmente regola il colore finale.

### Intensive Cream

GM-35 serve per la ricostruzione delle aree chiare sulla superficie in corrispondenza dell'attacco gengivale. GM-35 può anche essere applicato separatamente con la cottura di correzione.

I singoli passaggi possono essere divisi tra diverse cotture. Cottura dell'analogo guida secondo la tecnica di stratificazione standard (si veda il manuale tecnico per GC Initial Zr).

