

Programat® P310, P510, EP 3010, EP 5010

Tableaux des programmes de cuisson en °C

Version : 5; Parution : 2014-05
Valable dès la version de logiciel : P310, P510: V2.0; EP 3010, EP 5010: V1.0

Ivoclar Vivadent				B	S	t	T	H	V1	V2	L	tL			IRT-t*
Valeurs en °C				Température de service [°C]	Temps de fermeture [mm:ss]	montée en température [°C/min]	température de maintien [°C]	temps de maintien [hh:mm:ss]	début du vide [°C]	fin du vide [°C]	Long temps de refroidissement [°C]	vecteur de refroidissement [°C/min]	[°C]	[hh:mm:ss]	IRT Modus
Tableaux des programmes				100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	00:00	-
Zones de valeurs pour tous les programmes				700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-
Groupe de matériaux	P.Nr.														
IPS d.SIGN	1	1ère cuisson Opaquer (lait)	m.V.	403	06:00	80	900	01:00	450	899	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	2	2ème cuisson Opaquer	m.V.	403	06:00	80	890	01:00	450	889	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	3	1ère/2ème cuisson Margin	m.V.	403	06:00	60	890	01:00	450	889	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	4	1ère/2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	07:00	60	870	01:00	450	869	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	5	Cuisson Shade/Stains	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	6	Cuisson de glaçage	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	7	Cuisson de glaçage sans glasure	m.V.	403	04:00	60	870	01:00	450	869	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	8	Cuisson Margin Add-On	m.V.	403	04:00	60	830	01:00	450	829	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS InLine	9	Cuisson Add-On Mix 1:1	m.V.	403	04:00	60	810	01:00	450	809	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	10	Cuisson Add-On	m.V.	403	04:00	60	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	21	1ère/2ème cuisson Opaquer	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	22	1ère/2ème cuisson Margin	m.V.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	23	1ère cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	24	2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	25	Cuisson Margin Add-On	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	26	Add-On après Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	60	860	01:00	450	859	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS Empress Esthetic + CAD	27	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	28	Cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	29	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	41	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	42	1ère/2ème cuisson Incisal	m.V.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	43	Cuisson Universal Shade/Stains	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	44	Cuisson Universal Glasure	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	45	Cuisson Add-On	m.V.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max Press maquillage	61	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	62	Cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	63	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max Press stratification	81	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	50	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	82	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	50	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	83	1e/2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	50	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	84	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	85	Cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max ZirPress maquillage	86	Add-On avec cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	87	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	101	ZirLiner avant Wax-up + pressée	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max ZirPress stratification	102	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	103	Cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	104	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	121	ZirLiner avant Wax-up + pressée	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max ZirCAD + Ceram	122	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	123	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	124	1e/2e cuisson Incisal/Impulse	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	125	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	126	Cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	127	Add-On avec cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	128	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	141	Cuisson de ZirLiner	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max CAD Crystal/Glaze	142	1ère/2ème cuisson Margin	m.V.	403	04:00	40	800	01:00	450	799	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	143	Cuisson de connexion	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	144	1e/2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	403	04:00	40	750	01:00	450	749	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	145	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	146	Cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	147	Add-on avec cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	148	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	450	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	151	Régénération	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	éteint	éteint	750	25	éteint	00:00	éteint
	161	Cristallisation/Glaçage HT/LT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation
	162	Cuisson de correction	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	710	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation
IPS e.max CAD maquillage	163	Fusion/Cristallisation CAD-on	m.V.	403	02:00	30 / 30	830 / 850	02:00 / 07:00	550 / 830	830 / 850	610	éteint	403	06:00	Mode fusion
	164	Caractérisation/Correction CAD-on	m.V.	403	06:00	60 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	610	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation
	165	Speed-Cr./Spray	m.V.	403	00:30	120 / 70	850 / 870	00:00 / 03:30	690 / 850	850 / 870	705	éteint	460	00:01	éteint
	181	Cristallisation/Glaçage HT/LT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation
	182	Cuisson de maquillage	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max CAD stratification	183	Cuisson de glaçage	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard
	184	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	éteint				

Programat® P310, P510, EP 3010, EP 5010

Tableaux des programmes de cuisson en °F

Version : 5; Parution : 2014-05
Valable dès la version de logiciel : P310, P510: V2.0; EP 3010, EP 5010: V1.0

Ivoclar Vivadent					B	S	t	T	H	V1	V2	L	tL			IRT-t*
Valeurs en °F					Température de service [°F]	Temps de fermeture [mm:ss]	montée en température [°F/min]	température de maintien [°F]	temps de maintien [hh:mm:ss]	début du vide [°F]	fin du vide [°F]	Long temps de refroidissement [°F]	vecteur de refroidissement [°F/min]	[°F]	[hh:mm:ss]	IRT Modus
Tableaux des programmes																
Zones de valeurs pour tous les programmes																
Groupe de matériaux		P.Nr.	MIN MAX													
				212	00:18	18	212	00:00:00	32	32	32	0	32	00:00	-	
				1292	30:00	252	2192	01:00:00	2192	2194	2192	90	1292	01:00:00	-	
IPS d.SIGN	1	1ère cuisson Opaquer (lait)	m.V.	757	06:00	144	1652	01:00	842	1650	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	2	2ème cuisson Opaquer	m.V.	757	06:00	144	1634	01:00	842	1632	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	3	1ère/2ème cuisson Margin	m.V.	757	06:00	108	1634	01:00	842	1632	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	4	1ère/2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	07:00	108	1598	01:00	842	1596	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	5	Cuisson Shade/Stains	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	6	Cuisson de glaçage	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	7	Cuisson de glaçage sans glasure	m.V.	757	04:00	108	1598	01:00	842	1596	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	8	Cuisson Margin Add-On	m.V.	757	04:00	108	1526	01:00	842	1524	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	9	Cuisson Add-On Mix 1:1	m.V.	757	04:00	108	1490	01:00	842	1488	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	10	Cuisson Add-On	m.V.	757	04:00	108	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
IPS InLine	21	1ère/2ème cuisson Opaquer	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	22	1ère/2ème cuisson Margin	m.V.	757	04:00	108	1706	01:00	842	1704	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	23	1ère cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	24	2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	25	Cuisson Margin Add-On	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	26	Add-On après Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1580	01:00	842	1578	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	27	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1562	01:00	842	1560	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	28	Cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	29	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
IPS Empress Esthetic + CAD	41	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	108	1544	02:00	842	1542	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	42	1ère/2ème cuisson Incisal	m.V.	757	04:00	108	1526	02:00	842	1524	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	43	Cuisson Universal Shade/Stains	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	44	Cuisson Universal Glasure	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	45	Cuisson Add-On	m.V.	757	04:00	108	1418	02:00	842	1416	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
IPS e.max Press maquillage	61	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	62	Cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	63	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
IPS e.max Press stratification	81	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	90	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	82	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	90	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	83	1e/2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	90	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	84	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	85	Cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	86	Add-On avec cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	87	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
IPS e.max ZirPress maquillage	101	ZirLiner avant Wax-up + pressée	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
		102	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard
		103	Cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard
		104	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard
IPS e.max ZirPress stratification	121	ZirLiner avant Wax-up + pressée	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	122	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	72	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	123	Caractérisation de la cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	72	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	124	1e/2e cuisson Incisal/Impulse	m.V.	757	04:00	72	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	125	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	126	Cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	127	Add-On avec cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	128	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
IPS e.max ZirCAD + Ceram	141	Cuisson de ZirLiner	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	142	1ère/2ème cuisson Margin	m.V.	757	04:00	72	1472	01:00	842	1470	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	143	Cuisson de connexion	m.V.	757	04:00	72	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	144	1e/2ème cuisson Dentin/Incisal	m.V.	757	04:00	72	1382	01:00	842	1380	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	145	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	146	Cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	147	Add-on avec cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	148	Add-On après cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	842	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	151	Régénération	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	éteint	éteint	1382	45	éteint	00:00	éteint	
IPS e.max CAD Crystal/Glaze	161	Cristallisation/Glaçage HT/LT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation	
	162	Cuisson de correction	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation	
	163	Fusion/Cristallisation CAD-on	m.V.	757	02:00	54 / 54	1526 / 1562	02:00 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	éteint	757	06:00	Mode fusion	
	164	Caractérisation/Correction CAD-on	m.V.	757	06:00	108 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation	
	165	Speed-Cr./Spray	m.V.	757	00:30	216 / 126	1562 / 1598	00:00 / 03:30	1274 / 1562	1562 / 1598	1301	éteint	860	00:01	éteint	
IPS e.max CAD maquillage	181	Cristallisation/Glaçage HT/LT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	éteint	éteint	00:00	Mode cristallisation	
	182	Cuisson de maquillage	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	183	Cuisson de glaçage	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
	184	Add-On après cuisson glaçage	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	éteint	éteint	éteint	00:00	Mode standard	
IPS e.max CAD stratification	201	Cristallisation MO, LT, HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	éteint</				