

ALGITARTRE

Solution concentrée à usage professionnel

Utilisations

Décapage des pièces

- ⇒ prothèses acryliques
- ⇒ plâtres
- ⇒ revêtement
- ⇒ tartre
- ⇒ ciments
- ⇒ alginates des portes
- ⇒ matériaux de polissage bacs de décantation
- ⇒ Robinetteries—sanitaires



Mode d'emploi

Utilisation par ultrason

dosage : 1 litre pour 3 litres d'eau -

- ⇒ Dépôt de tartre
- ⇒ Décapage—déchets de toute prothèse acrylique, métallique (stellite)
- ⇒ Matériau de polissage ciment
- ⇒ Plâtres—revêtement

Utilisation par dépôt

Dosage : 1 litre pour 8 litres d'eau

- ⇒ Plans de travail inox, plastique, formica etc... (sauf marbre et pierre)
- ⇒ Sanitaires—robinetterie
- ⇒ Carrelages muraux et sols

Utilisation par bain

Dosage : 1 litre pour 2 litres d'eau - *1 liter for 2 liters water*

- ⇒ Décapage des instruments de laboratoire
- ⇒ Alginate des portes empreintes
- ⇒ Bols de malaxage

Conditionnement : pack de 2 litres
Code article : AD7813